

## ■ 품목명: 인공수정체삽입기구

■ 모델명: 제품참조

■ 허가/인증/신고번호: 수인 23-4315 호

■ 포장단위: 포장참조

■ 수입업자: (주)바슈헬스코리아 (서울특별시 강남구 테헤란로 98길 8 케이티앤지 코스모대치타워 13층)

■ 제조의뢰자: Bausch & Lomb, Inc. (미국, 1400 N. Goodman Street Rochester, NY 14609)

■ 제조자: Bausch & Lomb Inc. (미국, 3365 Tree Court Industrial Blvd. St Louis, MO 63122, USA)

■ 제조번호(Lot) 및 제조연월 또는 사용기간(Exp): 포장참조

■ 저장방법: 물기가 없는 건조하고 깨끗한 곳에 보관

■ 사용목적:

진료용 재료 등을 밀어 넣는 데에 사용하는 기구

■ 사용방법:

가. 포장라벨을 보고 유통기한 및 멸균을 확인한 후 포장을 뜯는다.

나. 드로우어 부분에 점탄물질을 바른 후 삽입할 인공수정체를 올려 놓는다.

다. 렌즈를 놓고 드로우어를 밀어 넣는다.

라. 인공수정체를 삽입하기 위해 절개한 눈의 부위에 끝 부분을 대고 plunger를 밀어 인공수정체를 삽입한다.  
렌즈가 부드럽게 잘 들어가도록 점탄물질이나 BSS용액을 넣어주면서 시술한다.

마. 렌즈삽입을 끝낸 후 사용한 MPort SI™는 버린다.

■ 사용 시 주의사항:

5-1. 주의사항

과도한 힘을 주지 말고 무리하게 조작하거나 진료 외의 다른 목적으로 사용하지 않는다.

5-2. 유효기간

해당 없음

5-3. 저장방법

물기가 없는 건조하고 깨끗한 곳에 보관

5-4 멸균 포장된 제품, 1회용이므로 사용 후 버린다.