

■ **제품명: Accuject™ 2.2 Injector Set**

■ **품목명: 인공수정체삽입기구**

■ **모델명:** 제품참조

■ **허가/인증/신고번호:** 수인 23-4276 호

■ **포장단위:** 포장참조

■ **수입업자:** (주)바슈헬스코리아 (서울특별시 강남구 테헤란로 98길 8 케이티앤지 코스모대치타워 13층)

■ **제조사:** MediceL AG (스위스, Luchten 1262, CH-9427 Wolfhalden)

■ **제조번호(Lot) 및 제조연월 또는 사용기간(Exp):** 포장참조


■ **저장방법:** 물기가 없는 건조하고 깨끗한 곳에 보관

■ **사용목적:**


진료용 재료 등을 밀어 넣는 데에 사용하는 기기

■ **사용방법:**


1. 점탄성 용액으로 팁과 로딩부위를 채우고 렌즈를 로딩 챔버의 중심부에 위치시킨다.

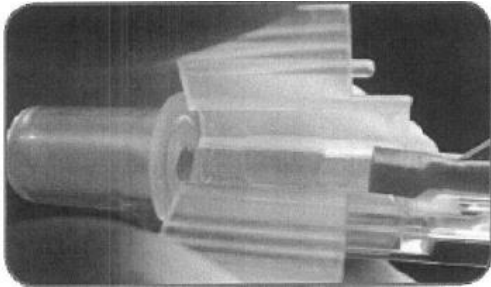


2. 3-piece 렌즈 또한 1-piece 렌즈와 동일한 방식으로 로딩시킨다. 트레일링 햅틱(trailing haptic)이 자동으로 플런저 헤드에 정확히 자리잡게 되므로 추가적인 로딩 절차는 필요하지 않다.

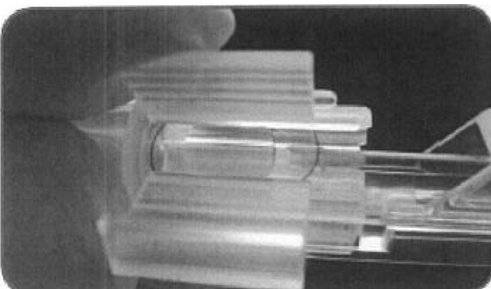


3. 카트리지를 닫고 겹자를 사용하여 렌즈 광학부에 약간의 힘을 가한다.

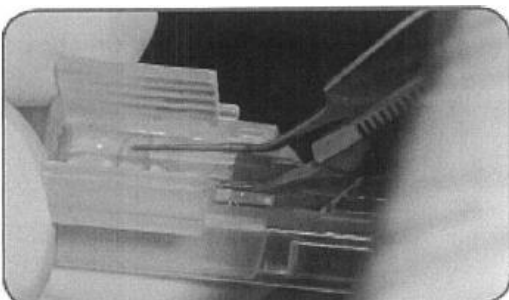


4. 찰칵하고 잠기는 소리가 나면 (“Click-lock” 메카니즘) 렌즈가 안전하게 로딩된 것으로, 삽입준비가 완료되었다.

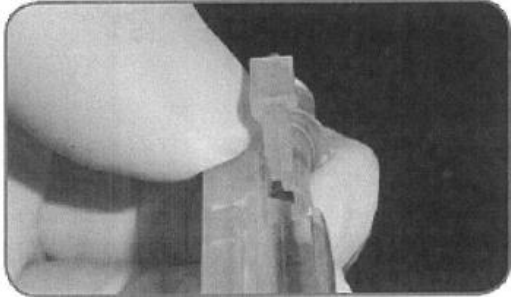

5. 삽입기 플런저를 앞으로 밀어 렌즈를 카트리지 팁으로 밀어낸다.

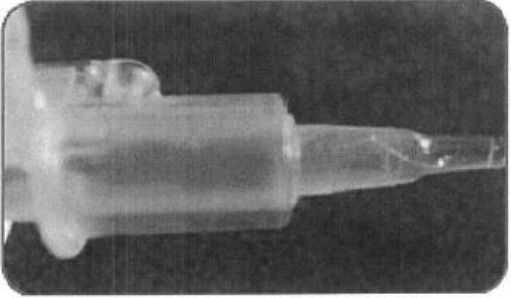

6. 플런저를 미세하게 잡아당긴 후, 렌즈를 한 번에 삽입시킨다.

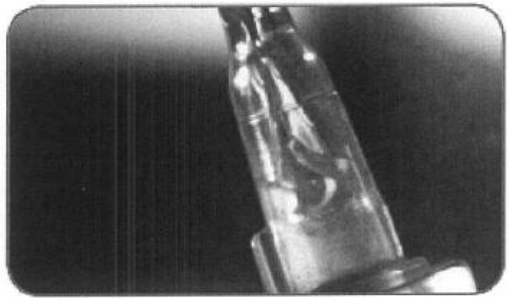

■ 사용 시 주의사항:

1. 본 제품은 재멸균하여 사용하지 않는다.
2. 본 제품은 1회용이므로 사용 후 폐기한다. (재사용 금지)

작성연월: 2023년 03월