

■ **품목명: 재사용가능안과용침**

■ **모델명:** 제품참조

■ **허가/인증/신고번호:** 서울 수신05-1022호

■ **포장단위:** 포장참조

■ **수입업자:** (주)바슈헬스코리아 (서울특별시 강남구 테헤란로 98길 8 케이티앤지 코스모대치타워 13층)

■ **제조의뢰자:** Bausch & Lomb, Inc. (미국, 1400 N. Goodman Street Rochester, NY 14609)

■ **제조사:** Bausch & Lomb, Inc. (미국, 3365 Tree Court Industrial Boulevard St Louis Missouri 63122)

■ **제조번호(Lot) 및 제조연월 또는 사용기간(Exp):** 포장참조

■ **저장방법:** 물기가 없는 건조하고 깨끗한 곳에 보관

■ **사용목적:**

인체에 의약품 등을 주입하거나 체액을 흡인하는 데에 사용하는 침.

■ **사용방법:**

**가. 사용방법 및 조작순서**

전문 의료인에 의해 사용한다.

**나. 사용 후 보관 및 관리방법**

1. 주사기에 50cc의 증류수 또는 탈이온수를 채우고 3way stopcock에 연결한다.
2. 3way stopcock을 핸드피스와 관류부분에 장착하여 주사기를 분사하여 세척한다.
3. 3번 이상 반복하여 세척을 마무리한다.
4. 멸균법

Standard Gravity Sterilization: 121°C/ 104.8 kPa. [1.048 bar](250°F/15.2 psi.)하에 포장된 상태로 30분

Flash Sterilization: 132°C/ 186.8 kPa. [1.868 bar](270°F/27.1 psi.)하에 비포장 상태 10분

High Vacuum(pre-vacuum) Sterilization: 134°C/206.8 kPa.[2.068 bar](274°F/30.0 psi.)하에 포장된 상태로 3분

**다. 유효기간**

10분 이상 사용하지 않는다.

■ 사용 시 주의사항:

- 1) 세척 시에는 반드시 Flushed 세척하고 처음 사용 전에는 반드시 멸균한다.
- 2) 핸드피스 관류 튜브와 노즐을 고정되게 조립할 때 핸드피스에 손상을 주지 않을 것
- 3) 세척 시에는 30°C~40°C의 따뜻한 증류수나 탈이온수를 사용하여 핸드피스와 주사침에 분사한다.
- 4) 멸균 시에는 차가운 멸균을 하지 않는다.

작성연월: 2019년 7월