

의약외품

제품명: 보스톤심플러스액(Boston SIMPLUS Multi-Action Solution)

성상: 플라스틱 용기에 들어있는 점성이 있는 무색 투명한 액

주성분: 글루콘산클로르헥시딘용액, 20% 염산폴리헥사메칠렌비구아니드, 30% 에티드론산테트라나트륨용액

효능 · 효과: 플루오로실리콘아크릴레이트 및 실리콘아크릴레이트 소재의 공기투과성 하드 콘택트 렌즈(RGP Contact Lens)의 세척, 행굼, 소독, 보존, 단백질제거

용법·용량:

1. 렌즈를 만지기 전 반드시 손을 비누로 깨끗이 씻는다.
2. 렌즈를 적절히 세척하여 행구어 낸 다음 렌즈케이스에 놓고, 이 약을 케이스에 가득 채워 다음 착용 전까지 최소한 4시간 이상을 담가 둔다.
3. 렌즈케이스에서 렌즈를 꺼내어 손바닥에 놓고 이 약을 4방울 떨어뜨려 약 20초간 렌즈 양면을 문지른다.
4. 이 약으로 약 5초 동안 렌즈 양면을 행구어 내고 착용한다.
5. 사용 후 렌즈케이스 내부를 뜨거운 물로 깨끗이 세척하여 공기 중에 말린다.

사용상의 주의사항:

1. 경고

콘택트렌즈와 렌즈관리용품에 문제가 있다면 눈에 심각한 장애를 일으킬 수 있다.

렌즈와 렌즈관리용품을 적절히 사용하기 위해서는 안과의사의 지시와 설명서에 명시되어 있는 모든 지시를 따르는 것이 필수적이다. 각막 궤양을 포함한 눈의 장애가 급속하게 발생하여 시력 상실을 초래할 수도 있다.

따라서 눈이 불편하다든지, 과도한 눈물, 시력둔화, 또는 눈의 충혈 등이 나타나면 즉시 렌즈를 제거하고 안과의사와 상담할 것

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 액의 구성성분에 알러지가 있는 경우
- 2) 소프트(친수성) 콘택트렌즈에 사용하지 말 것

3. 부작용

눈의 따가움, 작열감, 가려움 또는 자극감, 과도한 눈물, 비정상적인 누액분비, 눈의 충혈, 선명도 감소, 흐릿한 영상, 빛에 과민반응(광선협오증), 안구 건조 등의 증상이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 관찰되면 즉시 렌즈를 제거하고 검사한다. 문제가 지속되거나 렌즈가 손상되어 있다면, 렌즈를 다시 착용하지 말고, 즉시 안과의사와 상담할 것.

상기의 증상이 나타나면 감염, 각막궤양, 혈관신생, 홍채염과 같은 증상의 질환이 있을 수 있으므로 즉시 안과의사를 찾아 즉각적인 치료를 받음으로써 심각한 눈의 장애를 피하도록 할

것.

4. 일반적 주의

- 1) 콘택트렌즈 조작 전에는 항상 손을 깨끗이 닦고 행구도록 한다.
- 2) 이 액의 오염을 방지하기 위하여 용기의 마개 부분을 만지거나 다른 표면에 닿지 않도록 한다. 사용하지 않을 때에는 마개를 꼭 닫는다. 콘택트렌즈와 이 액을 적절히 다루지 않으면 안구감염을 야기하는 것으로 알려진 일반 세균에 의해 오염될 수 있다. 오염된 액을 사용하거나, 오염되거나 손상된 콘택트렌즈를 착용하면 눈에 심각한 손상과 시력감소를 초래할 수 있다.
- 3) 콘택트렌즈를 눈에 착용한 후에는 항상 렌즈케이스를 뜨거운 물로 세척하고 공기 중에 말린다. 미생물 오염과 안구 자극을 피하기 위해 렌즈케이스는 자주 교환해 준다.
- 4) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

5. 적용상의 주의

- 1) 이 약을 복용하지 말 것.
- 2) 직사광선을 피하여 보관하며 얼리지 말 것.
- 3) 사용기간이 경과된 제품은 절대 사용하지 말 것.
- 4) 소프트 콘택트렌즈에 사용하지 말 것.
- 5) 개봉 후 90일이 지난 제품은 폐기할 것

용량 또는 중량: 120mL

사용기한: 용기 옆면 별도표시

제조연월일: 용기 옆면 별도표시

제조번호: 용기 옆면 별도 표시

저장방법: 기밀용기, 실온(1-30°) 보관

* 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 직접 교환하여 드립니다.

* 소비자 상담전화: 02-561-9972 <http://www.CandB.co.kr>

수입자: (주)씨앤비코퍼레이션

서울시 강남구 테헤란로 623 삼성빌딩 9층(135-882)

제조 의뢰자: Bausch&Lomb Incorporated, 1400 N. Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA

제조자: Bausch&Lomb Incorporated, Greenville Solutions Plant, 8507 Pelham Road, Greenville, SC 29615-9598, USA

®/TM은 Bausch&Lomb의 등록 상표임을 나타냅니다. ©Bausch&Lomb Incorporated.

개정연월일: 2012년 9월 27일