

사용방법

가. 사용전 준비사항

- ① 멸균포장 외면의 그림에 본 제품에 포함된 멸균 구성품 및 별도 제공 구성품의 적절한 연결방법이 제시되어 있다. 환자의 안전을 위해 각 구성품의 설치, 사용하는 동안 무균 조작하여야 한다.
- ② 수술장비 본체(수정체절단장치)의 사용자 매뉴얼을 참조하여, 본체 및 부속품이 적절하게 작동하도록 기포를 제거하고 장비시스템의 작동을 준비한다. 유리체 절단술 팁을 관류용액이 담긴 작은 멸균 용기에 담근다. "ASP PRIME" 버튼을 눌러서(또는 풋페달을 밟는다) 라인에서 기포를 제거한다. 관류액은 반드시 제공된 카세트로 떨어지게 설치한다. 흡인을 중지하려면 다시 "ASP PRIME" 버튼을 누른다(또는 풋페달을 밟는다.). 의사는 유리체 절단 프로브를 관류액에 담근채로 컷터를 시험 작동하여 절단 속도(cut rate)와 흡인을 확인한다.
- ③ 2차 흡인장치 Secondary Aspiration(SA)
3-way 스톱콥 레버는 항상 사용하지 않는 흡인 라인 쪽으로 놓는다.
- ④ Air Fluid Exchange(AFE)와 Gravity Fed Infusion(GFI)의 올바른 스톱콥 설치는 멸균 포장 바깥쪽에 있는 설명서를 참조한다.

튜브 구성품	튜브 구성품 상의 색깔 표시
공기 라인	파랑 또는 파랑색 스트립
관류 라인	녹색 또는 녹색 스트립
흡인 라인	무색

나. 사용방법 및 조작순서

시스템의 작동은 사용자의 매뉴얼에 따른다. 바쉬롬은 본 제품의 부적절한 작동이나 또는각 구성품을 개별적으로 사용해서 야기되는 결과 및 합병증에 대해 책임을 지지 않는다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 본 제품은 일회용 제품이므로 사용 후 폐기한다.
- ② 재멸균하거나 재사용하지 않는다.