

사용시 주의사항

사용상 주의사항

일반적인 주의사항

1. 이 제품은 안과용으로만 사용해야 함.
2. 재사용하지 말 것.
3. 재살균하지 말 것.
4. 보관 용기가 손상된 경우에는 사용하지 말 것.
5. 유통기한을 확인할 것.
6. 후안방 부위를 초과하여 충전하지 말 것.
7. 방부제가 첨가되지 않았기 때문에 한명 이상의 환자에게 재사용해서는 안됨.
8. 남은 액은 반드시 버릴 것.

부작용

본 제품과 관련성이 있다고 추정되는 부작용과 잠재적으로 시력에 중대한 위협을 주는 합병증, 예전에 보고된 바 없는 미지의 이상반응, 중증도 및 발현율은 제조사(Bausch & Lomb)로 보고되어야 한다.

경고

실리콘 오일을 눈에 주입하기 전에 불화탄소액과 같은 고밀도의 액제는 초자체강으로부터 완전히 제거되어야 한다. 고순도로 정제되지 않은 실리콘 오일의 사용에 따른 각막 대상부전, 백내장, 이차성 녹내장, 유화현상이 보고되었다. 실리콘 오일의 순도와의 인과관계는 아직 정립되지 않았지만, 순도가 높은 실리콘 오일을 사용함에 따라 상기 언급한 합병증의 발생률이 낮은 것으로 알려져 있다.

금기

실리콘 재질의 인공수정체는 실리콘 오일로 인해 혼탁해질 수 있다. 따라서, 실리콘 인공수정체를 이식한 안구에는 실리콘 오일을 사용해서는 안된다. 다른 금기사항은 알려진 바 없다.

다른 물질과의 상호작용

현재까지 본 제품과 다른 물질과의 상호작용은 알려진 바가 없다.