

의약외품

제품명: 보스톤어드밴스클리너액(Boston Advance Cleaner, 세척액)

성상: 분리되거나 덩어리지지 않은 백색의 현탁액

[주성분]

트리데실에테르황산나트륨 30%용액

실리카

[효능 · 효과]

플루오로실리콘 아크릴레이트 및 실리콘 아크릴레이트 소재의 공기 투과성 하드 콘택트렌즈의 세척

[용법 · 용량]

1. 손을 비누로 깨끗이 씻고 손바닥에 렌즈를 놓은 다음 이 액 2-4 방울을 떨어뜨려 약 20초간 렌즈의 양면을 문지른다.
2. 수돗물로 깨끗이 헹구어 낸다.
3. 렌즈를 보관용기에 넣고 보스톤어드밴스컴포트포뮬라컨디쇼닝솔루션으로 채워 최소 4시간 가량 담근 후 착용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

- 1) 콘택트렌즈와 렌즈관리용품에 문제가 있다면 눈에 심각한 장애를 일으킬 수 있다.
렌즈와 렌즈관리용품을 적당하게 사용하기 위해서는 안과의사의 지시와 설명서에 명시되어 있는 모든 지시를 따르는 것이 필수적이다.
각막궤양을 포함한 눈의 문제로 말미암아 급속하게 시력상실을 초래할 수도 있다.
따라서 눈이 불편하다든지, 과도한 눈물, 시력둔화, 또는 눈의 충혈 등이 나타나면 즉시 렌즈를 제거하고 안과 의사와 상담할 것.
모든 콘택트렌즈 착용자들은 지시 받은 대로 안과의사를 방문해야 한다.
- 2) 콘택트렌즈 착용 중 안약을 투여할 경우에는 미리 전문의와 상담할 것.
- 3) 이 약을 직접 눈에 적용하지 말 것, 만일 이 약을 완전히 헹구지 않고 렌즈를 착용하면 충혈이나 자극증상이 나타날 수 있다. 이 경우는 즉시 렌즈를 제거하고 수돗물로 약액이 완전히 제거될 때까지 충분히 헹구야 하며 문제가 지속될 경우는 의사와 상담해야 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약 중의 성분에 과민증이 있는 자

3. 부작용

눈의 따가움, 작열감(화끈감), 가려움 또는 자극감, 처음 렌즈착용시보다 불편하다든지, 이물감, 과도한 눈물, 비정상적 누액(눈물)분비, 눈의 충혈, 흐릿한 영상, 무지개 또는 물체가 여러 개로 보임, 빛에 과민 반응 또는 각막 건조 등의 문제가 일어날 수 있다.

이러한 증상이 관찰된다면 즉시 렌즈를 제거할 것. 그 후에도 불편함이나 상기의 문제가 사라지지 않는다면 렌즈를 조사해서 렌즈가 손상되어 있다면 렌즈를 다시 착용하지 말 것. 렌즈가 이물이 있을 때에는 만일 문제가 계속된다면 즉시 렌즈를 제거하고 안과의사와 상담할 것. 상기의 증상들은 감염, 각막궤양, 혈관신생, 홍채염과 같은 상태로 발전할 수 있으므로 즉시 안과의사를 찾아 즉각적인 치료를 받음으로써 심각한 눈의 장애를 피하도록 할 것.

4. 일반적 주의

- 1) 콘택트렌즈 조작 전에는 항상 손을 깨끗이 닦고 행구도록 한다.
- 2) 콘택트렌즈 제거 시에는 좌, 우 혼동을 피하기 위하여 하나씩 제거하여 용기에 정확히 넣어 보관할 것.
- 3) 콘택트렌즈 제거 후에는 콘택트렌즈를 항상 세척, 소독해야 한다.
- 4) 이 약의 오염을 방지하기 위하여 용기의 마개부분을 만지지 말아야 하며, 사용하지 않을 때에는 마개를 꼭 닫는다.
- 5) 콘택트렌즈를 눈에 착용한 후에는 항상 보존 용기를 뜨거운 물로 세척한 다음 건조 시켜 보관한다. (콘택트렌즈 용기의 청결 상태를 항상 유지하고 용기는 2-3개월 마다 교환한다.)
- 6) 화장품이나 헤어스프레이 등이 눈에 들어가지 않도록 주의할 것.
- 7) 어린아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 8) 렌즈를 이 약에 담그지 말 것.

5. 적용상의 주의

- 1) 이 약을 복용하지 말 것.
- 2) 항상 신선한 제품을 사용하며 이 약을 재사용하지 말 것.
- 3) 직사광선을 피하여 실온에 보관하며 얼리지 말 것.
- 4) 사용시한이 경과된 제품은 절대 사용하지 말 것.
- 5) 소프트 콘택트렌즈에 사용하지 말 것.

[용량 또는 중량] 30mL

[사용기한] 용기 옆면 별도표시

[제조번호] 용기 옆면 별도표시

[저장방법] 기밀용기, 실온(1-30°C) 보관

* 소비자 상담전화:02-561-9972 <http://www.CandB.co.kr>

* 용기의 목 부분에 인쇄된 띠가 없거나 파손된 것은 사용하지 마십시오.

* 자세한 허가사항은 식품의약품안전청 의약품전자민원창구(ezdrug.kfda.go.kr)의 "의약품 등 정보"란을 참조해주시기 바랍니다.

[수입자] (주)씨엔비코퍼레이션 서울 강남구 테헤란로 623 삼성빌딩 9층

[제조의뢰자] Bausch&Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA

[제조자] Greenville Solutions Plant, 8507 Pelham Road, Greenville, SC 29615-9598, USA

Boston Advance는 Bausch&Lomb Incorporated의 등록상표입니다.

©Bausch&Lomb Incorporated

개정연월일 : 2012년 11월 09일