

■ **품목명: 흡인용튜브카테터**

■ **모델명:** 제품참조

■ **허가/인증/신고번호:** 서울 수신08-2246호

■ **포장단위:** 제조원의 포장단위

■ **수입업자:** (주)바슈헬스코리아 (서울특별시 강남구 테헤란로 98길 8 케이티앤지 코스모대치타워 13층)

■ **제조의뢰자:** Bausch & Lomb, Inc. (미국, 1400 N. Goodman Street Rochester, NY 14609)

■ **제조사:** Bausch & Lomb, Inc. (미국, 3365 Tree Court Industrial Blvd. St. Louis, MO 63122)

■ **제조번호(Lot) 및 제조연월 또는 사용기간(Exp):** 포장참조

■ **사용목적:**

재주입을 목적으로 하지 않고 액상 또는 반고체의 물질을 흡입하는 기구.

■ **사용방법:**

1. 처음 사용 시 따뜻한 물로 튜브를 린스한다.
2. 60cc 따뜻한 증류수나 탈이온수를 튜브내에 다음과 같이 통과시킨다.
 - 1) 주사기의 끝을 증류수나 탈이온수가 담긴 비이커에 놓고 주사기에 60cc가 될 때까지 채운다.
 - 2) 주사기의 끝을 3-way 스톱콕에 연결한 다음, 스톱콕 수나사쪽에 튜브를 연결한다.
3. 세척이 끝나면 주사기에 공기를 채워 스톱콕에 연결한다음, 튜브의 안쪽을 통해 주사기의 플런저를 민다.
4. 멸균방법
스팀멸균- 121° C (250° F) for 30 minutes,
or prevacuum at 134° C (274° F) for 3 minutes,
or flash autoclave at 132° C (270° F) unwrapped for 10 minutes
5. 안구의 전안방 수술시에 사용하는 백내장 장비에 설치하여 수술시 발생하는 반고제나 액상을 흡인하는데에 사용한다.

■ **사용 시 주의사항:**

1. 본제품을 사용전에 세척과 멸균을 한다. 사용후에는 세척하여 보관한다.
2. EO 가스멸균을 하지 말것.
3. 재 사용은 20회를 넘지 말 것.