

## ■ 품목명: 레이저방어용안경

■ 모델명: 제품참조

■ 허가/인증/신고번호: 수신15-905호

■ 포장단위: 제조원 포장단위

■ 수입업자: (주)바슈헬스코리아 (서울특별시 강남구 테헤란로 98길 8 케이티앤지 코스모대치타워 13층)

■ 제조자: NoIR Laser Company, LLC(미국,6155 Pontiac Trail South Lyon MI 48178 )

■ 제조번호(Lot) 및 제조연월 또는 사용기간(Exp): 포장참조

■ 사용목적:

레이저 진료 시 물체에 반사되어 눈에 들어오는 레이저 빔이 영향을 미치는 것을 방지하기 위하여 사용하는 안경

■ 부작용 보고 관련 문의처: 080-080-4183 (한국의료기기안전정보원)

■ 사용방법:

### (1) 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전 제품정보, 사용방법 및 주의사항을 확인한다.
- 2) 사용하고자 하는 레이저의 파장에 맞는 사양인지 확인한다.
- 3) 제품에 손상, 변색 또는 굽힘이 있는지 확인한다.

### (2) 사용방법

- 1) 렌즈에 부착되어 있는 필름을 벗긴다.
- 2) 프레임의 다리 부분을 젖혀 안경 쓰듯이 귀에 걸어 착용한다.

### (3) 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 사용하지 않을 때에는 보호 케이스에 보관한다.
- 2) 손상, 변색 또는 굽힘이 있는 경우 폐기한다.
- 3) 순한 세제 또는 렌즈/선글라스 세정제를 사용하여 비마모성 천으로 닦아 보관한다.

■ 사용 시 주의사항:

- (1) 레이저 빔이 조사되는 경로를 직접 응시하지 않는다.
- (2) 레이저 보호 안경은 레이저 빔의 경로가 벗어나거나 분산되는 것과 같이 돌발적인 노출에 대해 최대 10초 동안 보호한다.
- (3) 레이저 보호 안경은 착용자만을 보호하므로, 시술 구역의 다른 사람들은 반사되는 레이저 빔에의 노출에 대해 적절한 보호 기구를 착용하여야 한다.

