

의약외품

제품명: 보스톤원스텝리퀴드엔자임클리너액

(Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner, 단백질 제거제)

성상 : 이물질이 없는 무색 투명한 점액성 용액

주성분 : 셉틸리신에이(알카리성프로테아제-GL 440)

효능 · 효과 : 하드콘택트 렌즈에 침착된 단백질의 제거

용법 · 용량 : 5mL

1. 렌즈를 세척하여 깨끗이 헹군 후 렌즈케이스에 넣고 보스톤어드밴스콘디쇼닝솔루션으로 케이스를 가득 채운다.
2. 케이스 각각에 이 약 2방울을 떨어뜨려 최소 4시간 동안 방치한다.
3. 렌즈를 케이스에서 꺼내 이 약이 남지 않도록 보스톤어드밴스콘디쇼닝솔루션으로 약 5초간 깨끗이 헹군 후 착용한다.

사용상의 주의사항 :

1. 경고 :

콘택트렌즈와 렌즈관리용품에 문제가 있다면 눈에 심각한 장애를 일으킬 수 있다.

렌즈와 렌즈관리용품을 적당하게 사용하기 위해서는 안과의사의 지시와 설명서에 명시되어 있는 모든 지시를 따르는 것이 필수적이다. 각막궤양을 포함한 눈의 문제로 말미암아 급속하게 시력상실을 초래할 수도 있다.

따라서 눈이 불편하다든지, 과도한 눈물, 시력둔화, 또는 눈의 충혈 등이 나타나면 즉시 렌즈를 제거하고 안과 의사와 상담할 것.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약 중의 성분에 과민증이 있는 자

3. 부작용

이물이 있을 때에는 만일 문제가 계속된다면 즉시 렌즈를 제거하고 안과의사와 상담할 것.

이물감, 과도한 눈물, 비정상적인 누액분비, 눈의 충혈, 흐릿한 영상, 무지개 또는 물체가 여러 개로 보임, 빛에 과민반응 또는 각막 건조 등의 문제가 일어날 수 있다. 이러한 증상이 관찰된다면 즉시 렌즈를 제거할 것. 그 후에도 불편함이나 상기의 문제가 사라지지 않는다면 렌즈를 조사해서 렌즈가 손상되어 있다면 렌즈를 다시 착용하지 말 것. 렌즈가 이물이 있을 때에는 만일 문제가 사라지지 않는다면 렌즈를 조사해서 렌즈가 손상되어 있다면 렌즈를 다시 착용하지 말 것. 렌즈가 이물이 있을 때에는 만일 문제가 계속된다면 즉시 렌즈를 제거하고 안과의사와 상담할 것. 상기의 증상들은 감염, 각막궤양, 혈관신생, 홍채염과 같은 상태로 발전할 수 있으므로 즉시 안과 의사를 찾아 즉각적인 치료를 받음으로써 심각한 눈의 장애를 피하도록 할 것.

4. 일반적 주의

- 1) 콘택트렌즈 조작 전에는 항상 손을 깨끗이 닦고 헹구도록 한다.

- 2) 콘택트렌즈 제거 시에는 좌·우 혼동을 피하기 위하여 하나씩 제거하여 용기에 정확히 넣어 보관할 것.
- 3) 콘택트렌즈 제거 후에는 콘택트렌즈를 항상 세척, 소독해야 한다.
- 4) 이 액의 오염을 방지하기 위하여 용기의 마개부분을 만지지 말아야 하며, 사용하지 않을 때에는 마개를 꼭 닫는다.
- 5) 콘택트렌즈를 눈에 착용한 후에는 항상 보존 용기를 뜨거운 물로 세척한 다음 건조 시켜 보관한다. (콘택트렌즈 용기의 청결 상태를 항상 유지하고 용기는 2-3개월마다 교환한다.)
- 6) 화장품이나 헤어스프레이 등이 눈에 들어가지 않도록 주의할 것.
- 7) 어린아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

5. 적용상의 주의

- 1) 이 약을 복용하지 말 것.
- 2) 항상 신선한 제품을 사용하며 이 약을 재사용하지 말 것.
- 3) 직사광선을 피하고 실온에 보관하며 얼리지 말 것.
- 4) 사용기간이 경과된 제품은 절대 사용하지 말 것.
- 5) 소프트콘택트렌즈에 사용하지 말 것.
- 6) 개봉 후 90일이 지난 제품은 폐기할 것.

용량 또는 중량 5mL

사용기한 : 용기 옆면 별도표시

제조번호 : 용기 옆면 별도표시

저장방법 : 기밀용기, 실온(1-30°C) 보관

*소비자 상담전화:02-561-9972

<http://www.CandB.co.kr>

*용기의 목 부분에 인쇄된 띠가 없거나 파손된 것은 사용하지 마십시오.

[수입자] (주)씨엔비코퍼레이션 서울시 강남구 테헤란로 623 삼성빌딩 9층

제조의뢰자: Bausch & Lomb Incorporated, Greenville Solutions Plant, 8507 Pelham Road,
Greenville, SC 29615-9598, USA

제조사: Polymer Technology, Bausch & Lomb Incorporated, 1400 N, Goodman Street, Rochester,
NY 14609, USA

Boston Advance는 Bausch & Lomb Incorporated의 등록상표입니다.

©Bausch & Lomb Incorporated