

■ **품목명: 수동식 일회용 의료용 핸드피스, 일회용 안과용 침(한벌구성의료기기)**

■ **모델명:** 제품참조

■ **허가/인증/신고번호:** 수인14-499호

■ **포장단위:** 제조원의 포장단위

■ **수입업자:** (주)바슈헬스코리아 (서울특별시 강남구 봉은사로86길 6, 레베쌍트빌딩 6층)

■ **제조사:** Bausch & Lomb GmbH (독일, Lilienthalstr. 16, 18 69124 Eppelheim, Germany)

■ **제조번호(Lot) 및 제조연월 또는 사용기간(Exp):** 포장참조

■ **저장방법:** 실온보관

■ **사용목적:**

안과영역의 시술 시 약액을 흡입하는 용도로 사용하는 일회용안과용침과 수동식일회용의료용핸드피스의 한벌구성의료기기

■ **부작용 보고 관련 문의처:** 080-080-4183 (한국의료기기안전정보원)

■ **사용방법:**

가. 사용 전 준비사항

핸드피스에 안과용 침을 연결한다.

나. 사용방법

망막 및 황반 찢김/원공 주변의 망막 하 약액을 흡입한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

일회용 의료기기로 재사용이 금지되며, 사용 후 안과용 침과 핸드피스를 분리 후 각각 폐기한다.

■ **사용 시 주의사항:**

일회용 제품이므로 재사용이 금지되며, 사용 후 안과용 침과 핸드피스를 분리 후 각각 폐기한다.